

MANEJO DEL DESFIBRILADOR **(Localizado en Sala de Profesores/as)**

- 1- ENCIENDE EL APARATO (BOTONCITO VERDE DE ENCENDIDO)**
- 2- DESPEJA LA ZONA DEL PECHO, RETIRA TODO LO METÁLICO (SI HAY MUCHO PELO SE RASURA LA ZONA DE LOS ELECTRODOS)**
- 3- SACA LOS ELECTRODOS (TIRA DE LA PESTAÑA VERDE DEL CAJONCITO)**
- 4- COLOCA LOS ELECTRODOS (RETIRA EL PROTECTOR QUE LLEVAN PARA QUE SE PEGUEN)**
- 5- SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE VOZ (Y AVISOS VISUALES) DEL APARATO (DESA)**
 - a. “NO TOCAR A LA VÍCTIMA”**
 - b. “PULSAR EL BOTÓN DE DESCARGA” (SI FUERA NECESARIO)**
 - c. SEGUIR INSTRUCCIONES DEL DESA (CONTINUAR RCP, NUEVA DESCARGA, ETC)**